

Collari Cervicali



Caratteristiche tecniche

Realizzato con materiale plastico anallergico ed assemblato con morbido polietilene ad alta densità, grazie al velcro la chiusura è regolabile e sono facilmente distinguibili le taglie in quanto ognuna di colore diverso.

Viene utilizzato in casi di emergenza pre-ospedaliera, pronto all'uso, è stato studiato per immobilizzare la colonna cervicale, ridurre al minimo la flessione-estensione e minimizzare la pressione sulla carotide. Il foro anteriore permette l'accesso al collo per eventuali tracheotomie o per tastare il polso carotideo.

Si appiattisce per ridurre lo spazio nello stoccaggio.

RADIOTRASPARENTE

Codice	Misura	Nr Registrazione
MS-EX100	Infant - colore Rosa	1142661/R
MS-EX200	Pediatric - colore Celeste	1142661/R
MS-EX300	Short - colore Blu	1142661/R
MS-EX400	Neckless - colore Viola	1142661/R
MS-EX500	Regular - colore Arancio	1142661/R
MS-EX600	Tall - colore Verde	1142661/R

Istruzioni per l'uso:

Stabilizzare la testa del paziente. Accostare il collare al mento ed alla parte sternale, avvolgere il collo - Passare il collare dietro la nuca e chiuderlo attorno al collo - Serrare il collare e chiudere con l'apposito velcro - Mantenere la posizione del collo e apportare piccole modifiche.

Precauzioni:

Non utilizzare collari di misure inadeguate. Consultare sempre le indicazioni sull'uso dei dispositivi medici.

Confezione:

Primaria: Pezzi 1 in sacchetto in PVC - Secondaria: imballaggio di cartone

Prodotto Non Sterile

Prodotto costruito e commercializzato in ottemperanza della direttiva CE 93/42 Prodotto non invasivo di classe I

- **Codice CND:** Y060312