

Collari Cervicale regolabile



Caratteristiche tecniche

Il Collare cervicale regolabile Vincal, agevola il lavoro del soccorritore, occupa poco spazio e consente la corretta immobilizzazione.

Dopo la misurazione del paziente, occorre regolare il collare della giusta misura ed applicarlo.

Questo collare è adatto a tutti i pazienti adulti.

1. Utilizza le misure internazionali
2. Accesso facilitato per i controlli del battito, le procedure di controllo delle vie aeree e la visualizzazione attraverso il foro in corrispondenza della trachea
3. I bloccaggi predisposti assicurano la stabilità e il mantenimento in posizione del collare
4. Spazio sufficiente per consentire il passaggio delle dita attraverso l'apertura del pannello posteriore per la palpazione
5. Radiotrasparente, compatibile con scansione MRI e CT
6. Privo di lattice
7. Si appiattisce per ridurre lo spazio nello stoccaggio.

Codice	Misura	Nr Registrazione
MS-EX700	Adulti	1142665/R

Istruzioni per l'uso:

Stabilizzare la testa del paziente. Accostare il collare al mento ed alla parte sternale, avvolgere il collo - Passare il collare dietro la nuca e chiuderlo attorno al collo - Serrare il collare - Mantenere la posizione del collo e apportare piccole modifiche.

Precauzioni:

Non utilizzare collari di misure inadeguate. Consultare sempre le indicazioni sull'uso dei dispositivi medici.

Confezione:

Primaria: Pezzi 1 in sacchetto in PVC - Secondaria: imballaggio di cartone

Prodotto Non Sterile

Prodotto costruito e commercializzato in ottemperanza della direttiva CE 93/42 Prodotto non invasivo di classe I

- **Codice CND:** Y060312